



BRAZO PARA VENOCLISIS

DESCRIPCIÓN

Simulador realista que permite practicar y aprender las técnicas relativa a la terapia IV. Provee sensación y respuesta realista. Piel de vinil que al palparla facilita la ubicación de la vena. Una espuma suave simula el musculo deltoides y permite al estudiante la practica de inyecciones intramusculares

USOS:

- Práctica de la técnicas y los procedimientos de Venopunción IV
- Práctica de la técnicas y los procedimientos Inyección Intramuscular IM

Lavarse las manos antes de iniciar el procedimiento, no usar alcohol yodado

Llene bolsa con sangre simulada (anilina), colgar equipo en un atril, conecte el equipo a un tubo o vena, permita el flujo de líquido a través del brazo y deje que salga al otro extremo de la vena o tubo. Cierre el flujo con la llave.

El simulador está listo para práctica de toma de muestras al vacío e infusión venosa. No es recomendable el uso de catéteres de calibre menor de 21, así la piel y las venas tendrán una mayor duración

Para que la resistencia entre el catéter y la piel sea menor, se recomienda lubricar con SILICONA SPRAY para realizar la simulación.



UNIDAD DE LABORATORIO DE
SIMULACIONES