



## SIMULADOR PARA CATETERISMO FEMENINO

### Descripción

El simulador representa un abdomen femenino y se puede utilizar para sentir la presión y la resistencia que se ejecutan de la uretra y el esfínter durante la inserción del catéter.

La sensación normal de resistencia y presión será la misma cuando pase el catéter a través de la uretra y por el esfínter hasta la vejiga. Cuando la sonda penetre la vejiga, la orina artificial bajara por la sonda como ocurriría con un paciente real. Los genitales externos y el perineo se han moldeado con modelos reales. Los labios menores pueden apartarse de manera natural para mostrar el clítoris, el introito uretral y el vaginal

LF00856U

### USOS:

- Demostración y práctica de cateterización urinaria
- Identificación anatómica
- Cuidado perineal

Se llena mediante una bolsa con líquido que se conecta a una tubería. Se deja pasar el líquido hasta que salga por tubería opuesta y se cierra con la llave. Solo se abre cuando la sonda este en la vejiga.

La sonda pasa más fácil utilizando sonda siliconada o polipropileno.

Cuando se introduce el catéter debe estar lubricado.



UNIDAD DE LABORATORIO DE  
SIMULACIONES